


Wash your tube feeder after every use

Lave la sonda después de cada uso


Step 1: Rinse inside AND outside of tube feeder with **cool water** first.

1° Paso : Primero, lave el interior y el exterior de la sonda con **agua fría**.

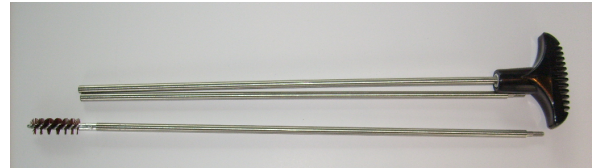


Step 2: Mix water and detergent. Thoroughly scrub outside of tube feeder.

2° Paso: Mezcle el agua con el detergente. Friegue duro el exterior de la sonda.

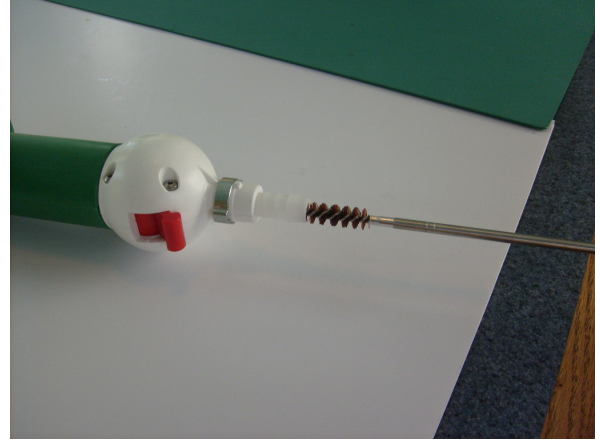

Step 3: Insert tube feeder brush through barbed fitting and push through the length of the tube feeder. Repeat this at least **3 times**

3° Paso: Inserte el cepillo a dentro de la conexión de manguera y empuje a través de la longitud de la sonda. Repita este paso al menos **3 veces**.

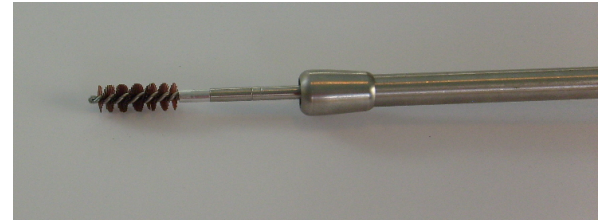

Step 4: Always hang tube feeder up when it is not in use! Make sure that red valve is in the open position to allow for tube to drain and dry. Do NOT lay tube feeder on the ground or leave in the sink.

4° Paso: ¡Cuando no estás usando la sonda, cuélguela! Asegúrese de que la válvula roja está abierta para permitir que la sonda se drene y seca rápidamente. ¡Nunca deje la sonda en el suelo o en el fregadero!

At the end of your shift, sanitize your tube feeder. Make sure that it is dry prior to sanitization. Hang up when cycle is finished.

¡Al final de su turno, desinfecte la sonda! Asegúrese de que está seca antes de la desinfección. Cuélguela cuando haya finalizado el ciclo.

